


Procédure d'enregistrement des données du test et réception du compte rendu

MindPulse ONLINE (version en ligne)

À la fin de votre test une fenêtre s'ouvre (cf. capture d'écran n°1) et vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données.

- Vous devez cliquer sur « télécharger les données brutes » pour être sûr de ne pas les perdre en cas de problème, le fichier qui se télécharge sur votre ordinateur est le fichier json qui est crypté pour protéger les données.
- Si vous cliquez sur « ne pas sauvegarder », vos données du test seront supprimées et nous ne pourrions pas les récupérer

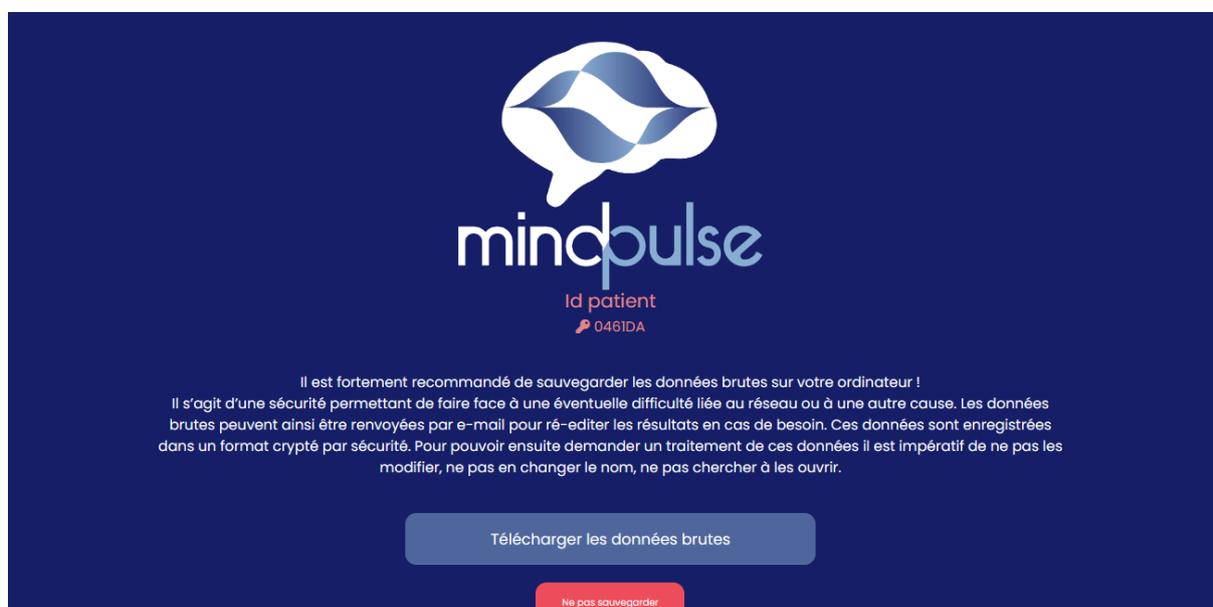

Après avoir cliqué sur « Télécharger les données brutes », une 2^e fenêtre apparaît (cf. capture d'écran n°2)

- Vous devez cliquer sur « Oui – Demander le compte rendu maintenant » pour recevoir votre compte rendu.
- Si vous ne souhaitez pas l'envoyer maintenant vous pouvez faire « Enregistrer sans demander d'analyse » vous pourrez le télécharger plus tard (cf. capture d'écran n°3).

- Vous ne devez cliquer sur « Non – Effacer ce test » uniquement lorsque vous êtes certaines de ne pas vouloir de compte rendu, vous ne pourrez donc pas avoir les résultats du test. Nous serons en incapacité de le récupérer.



Si vous avez cliqué sur « Enregistrer sans demander d'analyse » à l'étape précédente,

-Vous pourrez le récupérer en allant sur votre compte MindPulse Online dans l'onglet mes patients.

- A partir de la liste de vos patients, vous pourrez envoyer le compte rendu à l'analyse en cliquant sur l'icône en rouge. (cf. capture d'écran n°3)

		*****	*****	01/02/2023 10:00	Test à envoyer		Présentiel (avec un clinicien à côté)	0461DA	101
---	---	-------	-------	---------------------	-------------------	---	--	--------	-----

Récupération du CR à partir des datas brutes enregistrées

1. Se rendre sur l'onglet « Mes patients »
2. Cliquer sur « Décrypter tous les patients »
3. Sélectionner le patient dont vous avez les données en cliquant sur le crayon

Mes patients

Pour lancer un test MindPulse chez un patient déjà connu : décrypter vos patients, utiliser le filtre pour rechercher votre patient, et cliquez sur "lancer MindPulse".

Rechercher

9 patients / 5 test(s) effectués

Éditer le patient	Lancer mindpulse	Prénom	nom	Date du dernier test	Statut	Compte-rendu	Mode	Code
		20/01/2023 14:02	Test à envoyer		Distanciel (en téléconsultation)	435E
		20/01/2023 13:43	Test à envoyer		Présentiel (avec un clinicien à côté)	553F
		20/01/2023 12:14	Test à envoyer		Présentiel (avec un clinicien à côté)	9B39
		16/01/2023 19:06	Télécharger le compte-rendu		Présentiel (avec un clinicien à côté)	82F7
		05/11/2022 13:32	Télécharger le compte-rendu		Présentiel (avec un clinicien à côté)	938A

AJOUTER un nouveau patient

DÉCRYPTER tous les patients

EXPORTER liste des patients

4. Cliquer sur le nuage

Patient 553F5E

Retour

Décrypter

Lancer mindpulse

Attention vos comptes-rendus sont conservés pour une durée de 3 mois maximum, veuillez les télécharger.

Vous avez 1 CR à envoyer pour analyse

Test à envoyer (#840)

Date de passage 20/01/2023 13:43

Mode Présentiel (avec un clinicien à côté)

Version de compte-rendu mindpulse expert-en-vi

5. Une fenêtre s'ouvre. Dans celle-ci, sélectionner le fichier de données brutes
6. Cliquer sur « Valider »
7. Votre compte-rendu est en cours de traitement. Vous pourrez le récupérer sur cette même page en cliquant sur l'icône verte

Patient 82F762

[Retour](#) [Décrypter](#)

Prénom

Nom

Date de naissance

Sexe
Féminin

Latéralité
Droitier

Lancer mindpulse



Attention vos comptes-rendus sont conservés pour une durée de 3 mois maximum, veuillez les télécharger.

Télécharger le compte-rendu
(#803)

Date de passage 16/01/2023 19:06

Mode Présentiel (avec un clinicien à côté)

Version de compte-rendu mindpulse expert-vl-fr-pearson

